

우리사회를 위협하는 #음료마약 #음료스파이킹 #DRINKSPIKING



약물범죄




마약류 사용자 급증에 따른 공공기관의 주의 당부 및 사건 사고들

- 외교부, 연말연시 Drink Spiking 주의
- KBS뉴스, 마약사범 사상 첫 2만 명 돌파
- SBS뉴스, 고교 졸업 파티 드링크 스파이킹 주의
- 한국경제, 중학생 마약음료먹여 성폭행한 30대 남성

- 노컷뉴스, 약물 성범죄 '아는 사람이 더 무섭다' 첫만남 범행보다 2배 많아
- 한겨레, 10대에 '퐁당 마약' 성범죄.. 미국은 징역 20년, 한국은 집행유예
- YTN, 청소년에게까지 뿌린 마약, '대치동 마약 음료' 사건 전말
- 머니투데이, 카이스트 대학원생 '마약 파티' 동아리 여자친구 성폭행

CYD 음료 진단 키트?

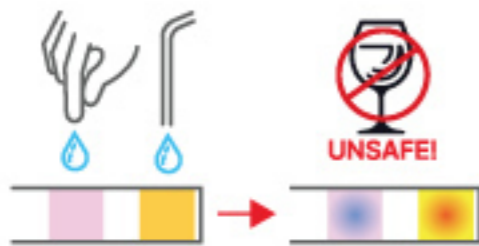

CYD Drug Checker
Check Your Drink GHB and Ketamine

영국에서 개발된 음료 스파이킹 테스트 1위 기업으로, 전 세계적으로 그 신뢰성과 효과를 인정받고 있습니다. CYD 음료 안전성 검사 시스템은 케타민(마취제), GHB(진정제), 코카인, 스코폴라민 및 기타 약물을 신속하게 감지할 수 있는 혁신적인 제품입니다. 이 시스템은 음료에 약물이 섞였는지 간편하게 확인할 수 있으며, 휴대가 용이하고 사용법이 간단하여 공공기관에서의 음료 안전 관리에 최적의 솔루션을 제공합니다.

카드형 음료 진단키트 제작




맞춤형 디자인 샘플

카드 뒷면

카드형 음료 진단키트 제품에는 귀하의 광고 및 캠페인, 원하는 로고와 문구를 전면 인쇄할 수 있습니다. 이를 통해 공공기관은 시민들이 검사 키트를 사용할 때까지 지속적인 공공 안전 캠페인 홍보 효과를 누릴 수 있습니다.

제작수량: 1000개 이상 / 추가 샘플 요청시 발송해드립니다.

음료마약 진단키트 사용방법

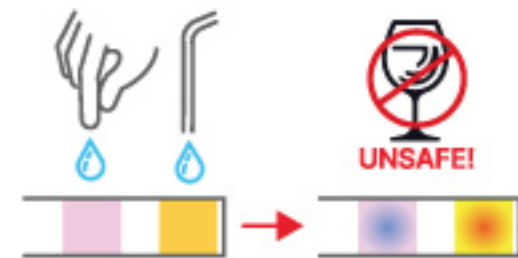

뒷면에 있는 진단 종이 부분에 손가락 또는 발대를 사용해 노란색과 분홍색 시험지에 음료 한 방울을 바른 후 색상 변화를 관찰합니다. 주황색 또는 파란색으로 변할 경우 안전하지 않으니 마시지 마십시오. 필요한 경우, 구토물에도 적용할 수 있습니다.



케타민(마취제) 및 GHB(진정제) 동시검사 결과는 30초 이내에 확인할 수 있습니다.